

Zdravo, ja sam Greta^{srb}

Uputstvo za upotrebu.

PLATANOMELÓN

Karakteristike



Greta S: dužina 5,9 cm i
prečnik 4,2 cm.

Greta L: dužina 6,5 cm i
prečnik 4,6 cm.



Greta S: Kapacitet 20 ml.

Greta L: Kapacitet 30 ml.



Ponovo upotrebljiva, nije za
jednokratnu upotrebu.



Jednostavna za upotrebu.



Meka i izuzetno svilenkasta
tekstura.

Instrukcije

Namena proizvoda:

Greta je menstrualna čašica koja služi za sakupljanje krvi i čelijskog otpada tokom menstruacije. Dizajnirana je da bude ponovo upotrebљiva i da se može koristiti do 10 godina. Izdržљiva je, poštuje intimnu floru i okolinu, te je dugoročno ekonomičnija. Može se koristiti neprekidno do 12 sati, što omogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti bez smetnji. Treba je izvaditi pre seksualnog odnosa sa penetracijom.

Uputstvo za pravilnu upotrebu:

- Pre prve upotrebe, prokuvajte čašicu 10 do 15 minuta. Pre svake upotrebe, kuvajte 3 do 5 minuta.
- Operite ruke i pronadite udoban položaj za umetanje čašice u vaginu. Preporučljivo je presaviti je da bi se smanjila veličina, tako će lakše ući. Ako ne izaziva nelagodnost i ostaje na mestu kada zavrtite kraj, to znači da je dobro postavljena.
- Da biste izvadili čašicu, nežno ubacite prste i stegnite čašicu da biste prekinuli vakuum. Važno je nikada ne vaditi čašicu povlačenjem direktno za kraj bez prethodnog prekidanja vakuuma.
- Ispraznite čašicu i operite je neutralnim sapunom i vodom.
- Preporučuje se pražnjenje svakih 4-8 sati, u zavisnosti od količine krvarenja, iako se može nositi do 12 sati.
- Nakon upotrebe, prokuvajte je 3 do 5 minuta i čuvajte je u torbici koja dolazi u pakovanju, daleko od bakterija i prljavštine.

Sastav:

Napravљeno od visokokvalitetnog hipoalergijskog silikona, bez lateksa i ftalata.

Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Ne koristite lubrikante na bazi silikona ili ulja, jer mogu oštetiti proizvod ili ostaviti trajno lepljiv osećaj.
- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohol ili izbeljivače.
- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.
- Preporučuje se čuvanje proizvoda u antibakterijskoj torbi.
- Držati van domašaja dece.

Način upotrebe

Vulva



PLATANOMELÓN